


Шовный инструмент по Berci для закрытия подкожной фасции

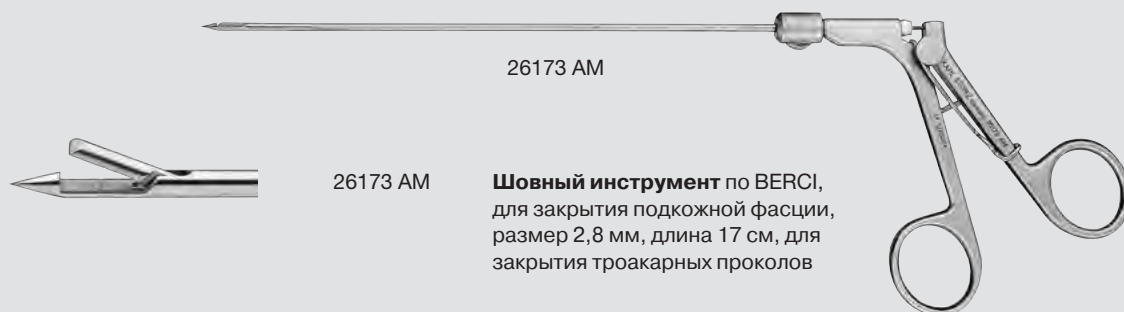

26173 AM

26173 AM

Шовный инструмент по Berci, для закрытия подкожной фасции, размер 2,8 мм, длина 17 см, для закрытия троакарных проколов




Шовный материал на половину длины захватывается щипцами. Под прямым оптическим контролем, при адекватном перитонеуме шовный инструмент вводится рядом с троакаром в подкожную ткань. Шовный инструмент должен пройти все слои ткани и находиться в свободной брюшной полости. Затем освобождается нить.




Инструмент вытягивается обратно. Необходимо следить за тем, чтобы в брюшной полости оставалась достаточно большая петля, а вне брюшной полости оставался шовный материал, достаточный для завязывания узла.



Теперь шовный инструмент вновь вводится без нити с противоположной стороны троакара. Захватить находящуюся в брюшной полости нить и извлечь шовный инструмент.

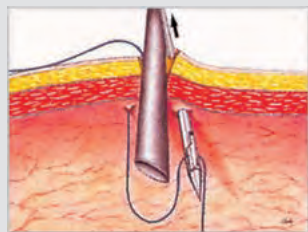

Теперь шовный инструмент можно извлечь из брюшной полости. При этом нить надежно удерживается щипцами.

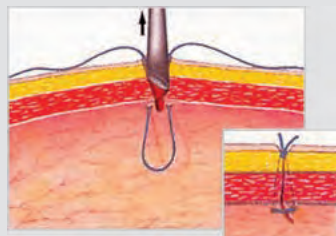

После удаления троакара рану закрывают путем завязывания обычного узла. Шовный инструмент обеспечивает закрытие раны, охватывающее все слои ткани брюшной стенки.